




Prelievo campioni superficiali Covid-19

Materiali, prelievo, trasporto

Check list materiali necessari al campionamento:

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

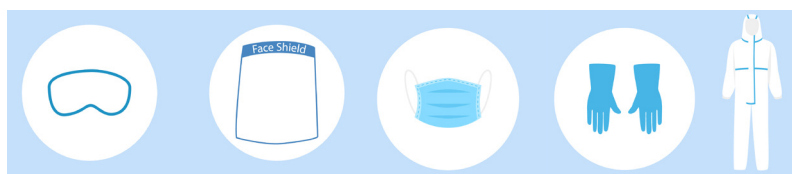

occhiali o visiera

mascherina

guanti

abiti

monouso

protettivi

MATERIALI PER CAMPIONAMENTO



tamponi
per Covid

dima


verbale

campionamento

trasporto
refrigerato


1- APRIRE LA BUSTINA

Aprire la bustina ed estrarre il tubo lungo con tampone e il tubo corto (che può essere messo in un portatamponi).

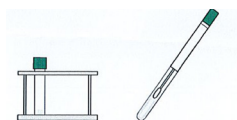


2- PREPARARE IL TAMPONE

Schiacciare la parte finale del tubo lungo così il liquido della spugnetta bagna il tampone.

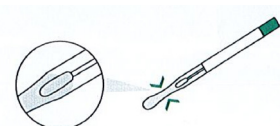


3- ESTRARRE IL TAMPONE

Estrarre il tampone tenendo le dita sul cappuccio verde e buttare il tubo con la spugnetta da cui si è estratto.

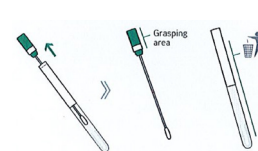


4- PRELIEVO

A- **superficie piana**: strisciare il tampone in verticale, orizzontale e diagonale ruotandolo (10x10 cm)
B- **superficie non piana**: strisciare negli angoli e ove possibile

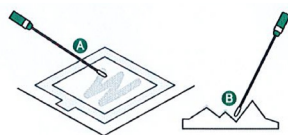

5- CHIUSURA TAMPONE

Togliere il tappo al tubo corto del rack, inserire il tampone e spezzarlo ove c'è il segno. Buttare via il residuo di tampone e richiudere il tubo corto.

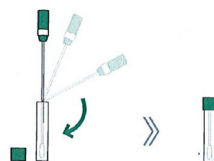

6- TRASPORTO

Scrivere i dati identificativi sul tubo e quelli del prelievo nel verbale di campionamento. Trasportare i tubi in un contenitore isolante a 2-6°C



GELT INTERNATIONAL
scientific consulting

Per concordare ritiro/consegna tamponi
051 0195372
support@geltinternational.it

